











Autopiqueurs et lancettes

Conseils pour la prise en charge des patients diabétiques

TABLEAU
5.5
SOIGNANTS












PANEL COMPARATIF DES AUTOPIQUEURS ET LANCETTES CORRESPONDANTES (12.2018)

Fabricant	Autopiqueurs classiques			Lancettes correspondantes			
	Nom	Nombre de positions de piqûres possible	Prélèvement sur site alternatif (AST) * possible ?	Remarques	Nom	Présentation	Particularités
ROCHE	Accu-Chek FastClix 	11	oui	<ul style="list-style-type: none"> - Facile à utiliser : armer et déclencher en un clic - Carouche avec 6 lancettes intégrées : pas de contact direct avec la lancette : moins de gestes à effectuer - Moins de risque de blessure - Impossible de réutiliser le barillet usagé - Durabilité de l'appareil : > 5000 piqûres - Profondeur de la piqûre : 0,7 à 2,2 mm 	Accu-Chek FastClix lancettes 	- Barillet avec 6 lancettes - Boîtes de 4 x 6 et 34 x 6 lancettes	<ul style="list-style-type: none"> - Diamètre 0,3 mm - Non siliconées - Géométrie à 3 facettes - Piqûre moins douloureuse grâce à la technologie Clixmotion - Carouche usagée réparable à la bande rouge et non réutilisable. - Peut être jeté à la poubelle ménagère
ASCENCIA	Microlet NEXT 	5	oui	<ul style="list-style-type: none"> - Capuchon verrouillable pour éviter un déclenchement involontaire - Bouton d'éjection des lancettes facile d'emploi - Mécanisme faisant peu de bruit 	Microlet lancettes 	Boîte de 200 pces	<ul style="list-style-type: none"> - Lancettes siliconées - 7 couleurs différentes, pour rappeler qu'il faut changer à chaque fois de lancette (par ex : 1 couleur par jour)
LIFESCAN	One Touch Delica 	7	non	<ul style="list-style-type: none"> - Piqûre moins douloureuse car à la technologie Advanced glide® - Système d'éjection des lancettes usagées sans contact 	One Touch Delica Lancettes 	Boîte de 200 pces	<ul style="list-style-type: none"> - Diamètre 0,2 mm (30G)
ABBOTT	Freestyle 	4	oui	<ul style="list-style-type: none"> - Petit format - Livré avec le set Freestyle Freedom Lite 	Freestyle lancettes 	200 pces	<ul style="list-style-type: none"> - Diamètre 0,3 mm (28G)
	Freestyle Lancing device 2 	8 (avec les demi-niveaux)	oui	<ul style="list-style-type: none"> - Technologie Comfort Zone pour réduire la douleur lors de la piqûre 	Freestyle lancettes 	200 pces	<ul style="list-style-type: none"> - Diamètre 0,3 mm (28G)

Copyright© Ensemble Hospitalier de la Côte, Noémie Marcoz, v7, 12.18

PANEL COMPARATIF DES AUTOPIQUEURS ET LANCETTES CORRESPONDANTES (12.2018)



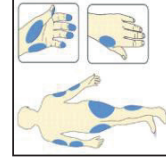



Fabricant	Autopiqueurs classiques				Lancettes correspondantes		
	Nom	Nombre de positions de piqûres possible	Prélèvement sur site alternatif (AST) * possible ?	Remarques	Nom	Présentation	Particularités
SANOFI-AVENTIS	MyStar SylkoFeel 	5	oui	- Anti-vibration - Ejection des lancettes usagées sans contact	MyStar SylkoFeel lancettes 	Boîte de 2x 100 pces	- Diamètre 0,2 mm (33G) - Siliconées, sans latex
	MyLife Softlance 	7	oui	- Déclenchement de la lancette sans vibration grâce à des guides précis permettant un guidage linéaire de la lancette - Mécanisme de retrait intelligent pour éjecter la lancette sans la toucher Déverrouillage sécurisé pour éviter tout déclenchement de la lancette lors de son remplacement	myLife Lancets / Lancets multicolor 	Boîte de 200 pces	- Diamètre de 30G - Pointe à triple biseau pour une piqûre nette et douce - Longueur d'aiguille constante pour un prélèvement sanguin optimal (3,3 mm) - myLife Lancets multicolor : 7 couleurs différentes
YPSOMED	MyLife AutoLance 	7	oui	- Chargement et de déclenchement en une seule étape automatique - Pression de piqûre régulière pour un prélèvement sanguin quasiment indolore - Bouton de sécurité empêche tout déclenchement accidentel Le verrouillage à baïonnette permet de remplacer facilement les lancettes	myLife Lancets / Lancets multicolor 	Boîte de 200 pces	- Diamètre de 30G - Pointe à triple biseau pour une piqûre nette et douce - Longueur d'aiguille constante pour un prélèvement sanguin optimal (3,3 mm) - myLife Lancets multicolor : 7 couleurs différentes
	Healthpro autopiqueur 	5	non	- Ejection hygiénique de la lancette sans contact - Livré avec le glucomètre Axapharm Healthpro-X1	Healthpro lancettes 	Boîte de 200 pces	- Diamètre 0,3 mm (30G) - Prélèvement de sang moins douloureux grâce à la pointe d'aiguille à triple biseau



- * Les sites alternatifs possibles (en anglais « Alternate Site Testing », abrégé « AST ») sont les suivants :
- main (base du pouce et de l'auriculaire),
 - bras,
 - avant-bras,
 - mollet,
 - cuisse

PANEL COMPARATIF DES AUTOPIQUEURS ET LANCETTES CORRESPONDANTES (12.2018)

Pour l'utilisation professionnelle :

Autopiqueurs à usage unique, pour l'utilisation professionnelle						
Fabr.	ROCHE	YPSOMED	BD	B. BRAUN	AXAPHARM	ASCENCIA
Nom	Accu-Chek Safe-T-Pro Plus 	myLife Safety Lancets 	BD Microtainer Lancettes 	Solofix® Safety lancettes 	Vitrex Lite III safety lancet 	Single-Let 
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - 3 profondeurs de piqûre possibles : 1,3 - 1,8 - 2,3 mm - 23 G - Possibilité de faire de l'AST - Boîte de 200 pces 	<ul style="list-style-type: none"> - Profondeur de piqûre et diamètre : 28 G x 1,5 mm 30 G x 1,2 mm (Confort®) - Stérilité garantie par le capuchon protecteur (pas de contamination) - Boîte de 200 pces 	<ul style="list-style-type: none"> - Ergonomique et précis - Activation automatique par simple contact avec la peau - Profondeur de piqûre et diamètre : 30 G x 1,5 mm - Boîte de 200 pces 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 profondeurs et diamètre différents : 25 G X 1,5 mm 21 G x 1,8 mm - Pour la néonatalogie : 0,8 X 2mm - Boîte de 200 pces 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 diamètres différents : 28 G x 1,8 mm 21 G x 1,8 mm - Boîte de 100 pces 	<ul style="list-style-type: none"> - Forme ergonomique en T - Profondeur de piqûre et diamètre : 28 G x 1,6 mm - Boîte de 200 pces

Conditions de remboursement des accessoires d'insulinothérapie en Suisse (dès le 01.07.2018) :

- Pour les diabétiques de types 1 et 2 traités à l'insuline, ainsi que pour les femmes qui souffrent d'un diabète gestationnel, le remboursement des bandelettes se fait sans restriction quantitative.
- Par contre, pour les patients traités sans insuline, le remboursement est limité à 400 bandelettes par année.
- Le remboursement maximal pour les bandelettes de mesure de la glycémie est de 72 cts par bandelettes (boîte de 100 pces) ou 71 cts (boîte de 50 pces) jusqu'au 31.12.18 puis sera ensuite de 62 cts par bandelette.
- Les bandelettes pour la mesure des corps cétoniques, les tampons alcooliques ainsi que les lancettes pour autopiquesteurs sont remboursés sans limitation
- Le remboursement des lecteurs de glycémie (avec ou sans accessoires de prélèvement intégré) est limité à un appareil chaque 2 ans à un prix maximal de 78.-
- Les lecteurs de glycémie avec indicateur sonore sont remboursés pour les personnes aveugles ou fortement handicapées de la vue, à raison d'un appareil chaque 3 ans.

Référence :

<http://scoedssed.ch/fr/informations-pour-professionnels/informations-medicaments/>
<https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/leistungen-faire/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html>
https://www.diabetesschweiz.ch/fr/actualites/archiv/2018/liste_des_moyens_et_appareils_lima_1er_juillet_2018_1er_janvier_2019/

Références :

<http://www.diabetesgesellschaft.ch/fr/>
<https://www.abbottdiabetscare.ch>
<https://www.accu-check.fr> et <https://www.accu-check.ch>
<https://www.ascensia-diabetes.ch/fr/home>
<http://www.lifescan.fr>
<http://fr.boslar.ch>
<https://www.mylife-diabetescare.com/fr-CH/>
<http://www.axapharm.ch>

Document créé par N. Marcoz (07.2013). Validé par Dre Isabelle Hagon-Traub et Dr François Jomayvaz
Document révisé par N. Marcoz (11.2017). Validé par Dres Daniela Sofrà et Patricia Halfon
Document révisé par N. Marcoz (12.2018). Validé par Prof. Anne Wojtusiszyn et Dr Charly Buillard

Date de la prochaine révision : décembre 2019